

FITNESS SCALE 7850


Driver installatie instructie

■ Driver installatie

Om het programma "Scale customisation" volledig te kunnen gebruiken, moet eerst een driver worden geïnstalleerd, die de weegschaal software herkent :

1. Sluit de fitness schaal aan aan het stopcontact
2. Sluit de schaal aan de PC aan met de USB kabel
3. De PC herkent nieuwe software en vraagt de driver automatisch op.
4. Volg nu de installatie instructie van de PC.

■ Installatie met Windows XP

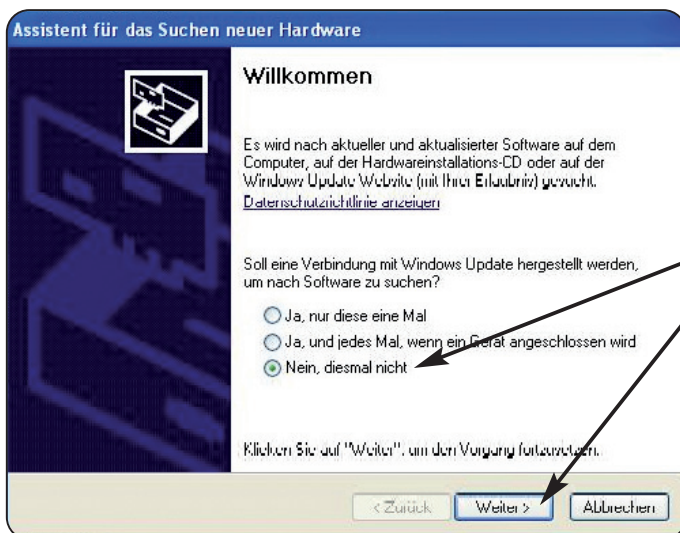


1. Maak géén verbinding met Windows Update. Kies: No, not this time (Nein, diesmal nicht) en klik op "continue" (weiter)



2. Selecteer "Install software automatically" en klik op "continue". De computer vindt de drive file automatisch.

Nu wordt de driver automatisch gedownload vanaf de CD en geïnstalleerd op de computer. Installeer de 2e driver op dezelfde wijze. Open nu het "Scale" programma.

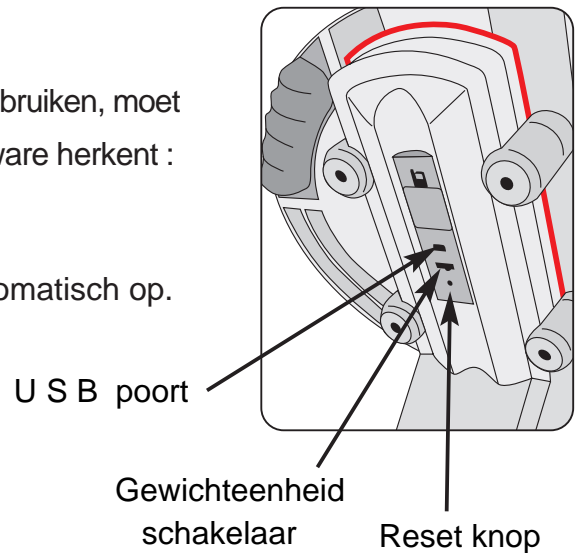


FITNESS SCALE 7850


Driver installatie instructie

■ Installatie met Windows 2000 en andere

Bij veel operating systems moet op de CD "Fitness scale 7850" de folder "DRIVER" geopend worden. In die folder zijn de vereiste files beschikbaar.

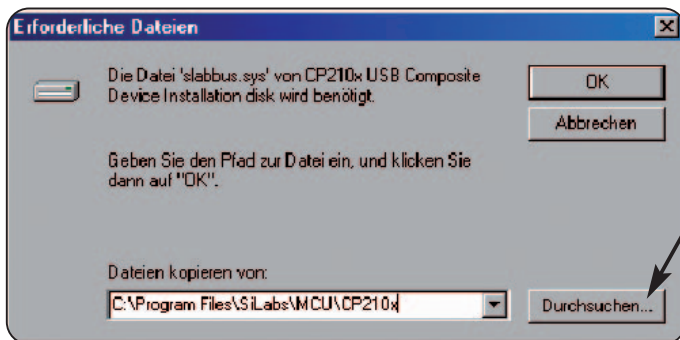

1. Selecteer "**Browse**" om het gewenste bestand vanaf de CD "**Fitness Scale 7850**" te installeren op uw computer.

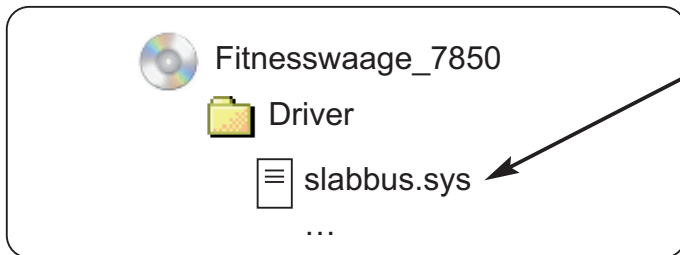


2. Selecteer het gewenste driver bestand vanaf de "**DRIVER**" folder op de CD "**Fitness Scale 7850**"

3. Klik op "**OK**" om de installatie te starten

Nu wordt de driver automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw computer. Installeer de 2e driver op dezelfde wijze.

Open nu het "**SCALE**" programma

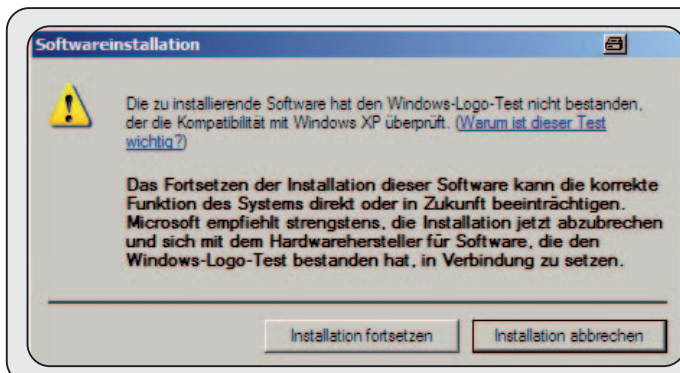

Als uw computer een waarschuwing toont, zie afbeelding hienast, kunt u deze negeren. Onze software kan geïnstalleerd worden zonder problemen op te leveren.

FITNESS SCALE 7850

Driver installatie instructie

Start het programma door te klikken op de "Scale program" knop.

deutsch | english | français

SOEHNLE
PROFESSIONAL

FITNESS SCALE 7850

THE MULTI-FUNCTIONAL SCALE



- Operating manual
It's so easy!
- Manual to install driver
How to connect your PC with the scale.
- **"Scale" program**
Personalize your print-out.
- Evaluation of readings
What do these figures mean?

www.soehnle-professional.com

Weegtechniek Holland B.V.

Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde Nederland

Tel. +31 (0)36 522 20 30
Fax +31 (0)36 522 20 60
Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle-medical.nl

Weegapparatuur en weegcomponenten