

BABY WEEGSCHAAL Type 8310.00

GEBRUIKSAANWIJZING

Een product van Soehnle Professional



- > 10 kg en 20 kg uitvoeringen
- > Schaalverdeling 5 g of 10 g
- > Hold functie
- > Batterij- of 230 V netvoeding
- > Automatische uitschakeling bij batterijvoeding
- > Optie: transportkoffer



BABY WEEGSCHAAL Type 8310.00

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank dat u deze babyweegschaal uit de "Medical" productrange van Soehnle-Professional hebt aangeschaft ! Heeft u vragen over deze weegschaal die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw Soehnle-Medical leverancier of bezoek ons op: www.soehnle-medical.nl

In gebruikname

Plaats een 9 V blokbatterijtje in het batterijvak aan de onderzijde van de weegschaal, of sluit de daar aangesloten netadapter aan op een wandcontactdoor 230 VAC.

Toepassing

Deze weegschaal is voor het wegen van baby's ontworpen.

Hij mag niet voor ijkplichtige wegingen worden gebruikt.

Het toestel voldoet aan de eisen van de EG Richtlijnen:

2004/108/EC, 2006/95/EC en EMC eisen.

Lees voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Er staan belangrijke aanwijzingen in voor het in gebruik nemen, het gebruik waar de schaal voor bedoeld is en het onderhoud.

De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer het navolgende niet in acht wordt genomen: toepassen alleen binnenshuis, overschrijdt niet de in de normen van bovenstaande richtlijnen en de in deze handleiding genoemde grenzen.

Schoonmaken

Een vochtige doek en normaal verkrijgbare schoonmaakmiddelen zijn voldoende. Gebruik geen schurende middelen..

Onderhoud

De weegschaal heeft geen geregeld onderhoud nodig.

Afstelling is al door de fabrikant uitgevoerd. Het is toch zinvol om met regelmatige tussenpozen de weegnauwkeurigheid te controleren, hetzij met eigen ijkgewichten, dan wel door uw leverancier. Bij afwijking > 50 g bij 15 kg belasting met de weegschaal opnieuw worden afgeregeld.

Reparaties mogen alleen door Soehnle-Professional geautoriseerde technici worden uitgevoerd.

Veiligheid

Hoewel de weegschaal voldoet aan de EG voorschriften over radio onstoring, kan het beïnvloeding door frequenties uitstralende toestellen, b.v. gsm's, in de onmiddellijke nabijheid voorkomen. Als deze bron wordt weggenomen werkt het toestel weer normaal, hooguit een keer uit- en opnieuw inschakelen kan nodig zijn.

Deze weegschaal is een meetinstrument, het is IP 54 dicht. Hoge luchtvochtigheid, dampen, vloeistoffen en vervuiling moet worden vermeden.

Tocht, trilling, snelle temperatuurwijziging of zonnestraling kunnen de meting beïnvloeden.

Garantie / aansprakelijkheid

Indien een gebrek aan de weegschaal naar het oordeel van Soehnle-Professional is veroorzaakt door onjuiste fabricage of componenten, is Soehnle-Professional gerechtigd om ofwel het gebrek te herstellen, of een vervanging te leveren. Vervangen delen worden eigendom van Soehnle-Professional. Indien herstel of vervanging niet het door Soehnle-Professional gewenste resultaat oplevert, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Vervolgschade is uitgesloten van de garantieverplichting, de garantie is beperkt tot bovenstaande beschrijving. De garantietermijn bedraagt 1 jaar en begint op de dag van de levering. Het bewijs van aankoop dient aangeleverd te worden (factuur).

Geen garantie wordt verleend, noch aansprakelijkheid wordt aanvaard voor (vervolg)schade die het gevolg is van:

Ongeschikte of onvakkundige opslag of toepassing, onjuiste montage of ingebruikstelling, normale slijtage, foutieve of slordige behandeling, in het bijzonder overmatige belasting en gebruik, chemische, elektrochemische en elektrische invloeden, zolang deze niet zijn te herleiden naar een door Soehnle-Professional veroorzaakt gebrek.

Indien klimatologische of bedrijfsomstandigheden of andere beïnvloeding leiden tot veranderingen in de materiaalsamenstelling van het toestel, vervalt de garantie op het correct functioneren van de weegschaal.

Afvoeren van de weegschaal

Dit toestel mag niet als normaal afval behandeld worden, maar dient te worden afgegeven op een innamestation voor het recyclen van elektrische en elektronische toestellen. Dit is eveneens van toepassing op de batterijen.

Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij uw gemeente en lokale afvalverwerkingbedrijven.





BABY WEEGSCHAAL Type 8310.00

GEBRUIKSAANWIJZING

Omschakelen van kg naar lb (engels pond) gewichtaflezing

- Druk, bij uitgeschakelde schaal, de toets > 5 sec. lang in
- Na 88888 in het display: wissel de eenheid met de toets
- Druk opnieuw de toets > 5 sec. in

Wegen:

- Na inschakelen met de toets toont de display eerst 8.8.8.8
- Daarna stel de schaal automatisch nul

Tarreren:

- Bedien de toets, de aflezing wordt nulgesteld
- Opheffen door met een leeg weegvlak de toets te bedienen of automatisch na 2 minuten

Hold functie

Zodra de gewichtaflezing, bij meer dan 2 kg belasting, stabiel is geworden, wordt de gewichtwaarde op het display vastgezet. Steeds na 10 sec. wordt de waarde automatisch herrekend.

Baby schaal

De baby schaal kan geplaatst worden en worden afgenomen door hem horizontaal om de zijranden van het weegvlak te schuiven.

Overbelasting

Voorkom overbelasting, neem deze direct weg. Vermijd stoten tegen het weegvlak en de baby schaal.

Gebruik bij voorkeur de transportkoffer voor vervoer van de baby weegschaal.

Aan / uitschakelen

De weegschaal dient met een leeg weegvlak te worden ingeschakeld, door op de toets te drukken.

De weegschaal schakelt uit door met een leeg weegvlak (aflezing op 0.00) de toets te bedienen.

Op batterijvoeding schakelt de schaal na een vaste tijd automatisch uit om de batterij te sparen

Justeren - kalibreren

- Druk, bij ingeschakelde weegschaal, de toets >5 sec lang in
- Laat de toets los als: C 0 verschijnt
- Wacht tot: C 100 verschijnt
- Plaats een nauwkeurig ijkgewicht ter waarde van het maximum weegvermogen op de weegschaal
- Druk 1 x op de toets
- Wacht tot: 100 verschijnt
- Verwijder het ijkgewicht
- Druk 1 x op de toets

De justering is nu voltooid, de weegschaal is gereed voor gebruik.