


### In gebruikname


Plaats de batterijen in het vak in de bodem  
Zorg voor een harde, vlakke en stevige ondergrond



Omschakelen van kg naar Lb aflezing

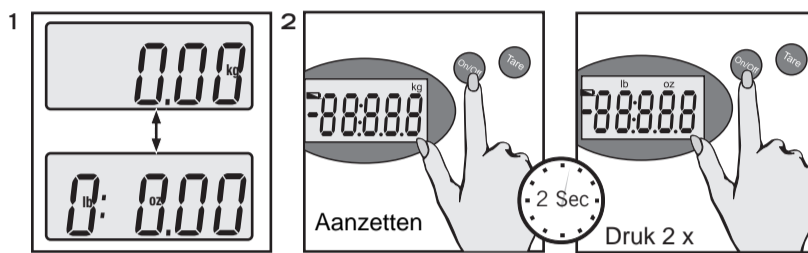

Wegen en tarreren (nulstellen van b.v. een onderlegger)  
Na stilstand wordt de aflezing vastgezet

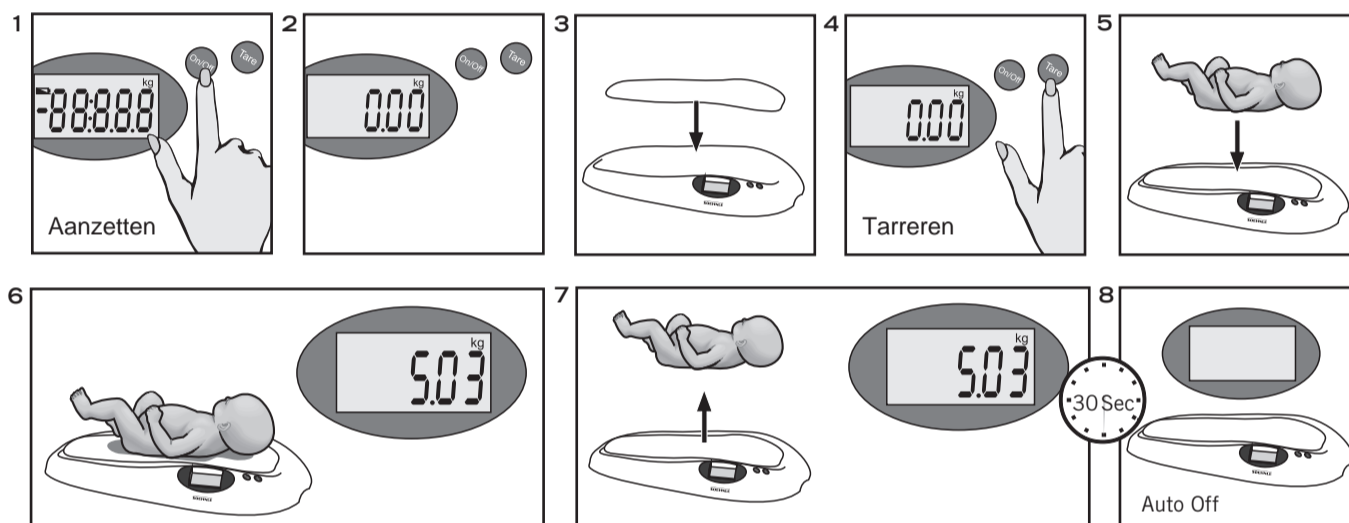


Automatische uitschakeling na 30 seconden

Meldingen:


Lo: of Lo: batterijen leeg

0-Ld: weegschaal overbelast

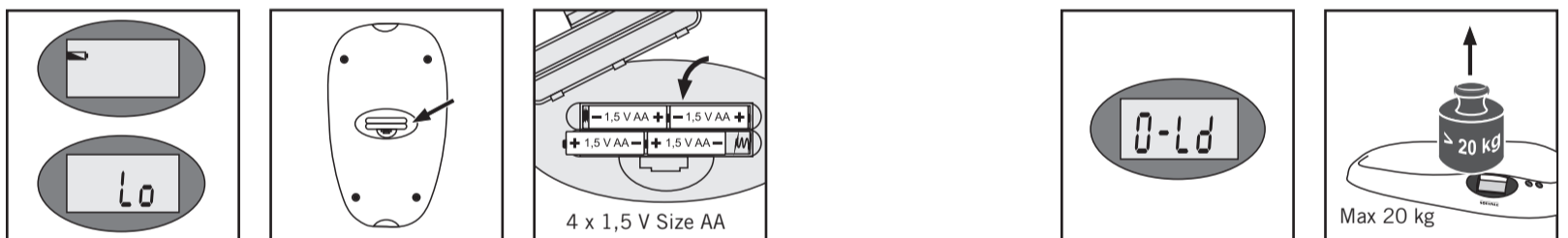

Reinigen

Gebruik alleen een vochtige doek, geen agressieve schoonmaakmiddelen.  
Vermijd vocht.

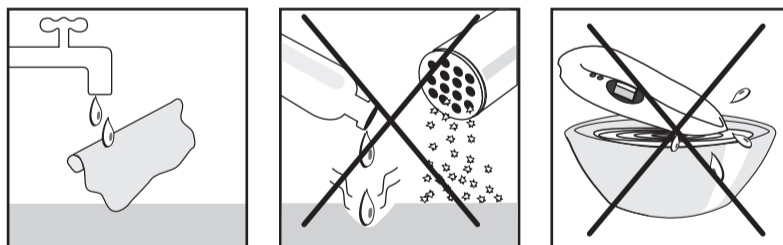

### Garantie

Soehnle garandeert voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum gebreken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten kosteloos te zullen herstellen, hetzij door het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, hetzij door vervanging van onderdelen.

Gelieve de aankoopfactuur te tonen bij garantieaanspraken.

Bij garantie de weegschaal a. u. b. met de aankoopfactuur franco naar uw leverancier terugsturen.

Dit apparaat is ontstoord volgens de geldende EG-richtlijn2004/108/EC.

Opmerking: Onder extreme elektromagnetische invloeden, b.v. bij het gebruik van een mobilfoon in de directe omgeving van het apparaat, kan de weergegeven waarde worden beïnvloed. Na beëindiging van de storende invloed kan het product weer correct worden gebruikt, eventueel dient het opnieuw te worden ingeschakeld.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© Weegtechniek Holland B.V.

### Informatie:

Al onze af fabriek bijgeleverde batterijen zijn zonder schadelijke effecten voor het milieu! Wettelijk voorgeschreven aanwijzing omtrent het afvoeren vanbatterijen: batterijen horen niet in de vuilnisbak. Als consument bent u wettelijk verplicht om uw lege batterijen in te leveren.

U kunt uw oude batterijen bij de openbare depots in uw gemeente afgeven, of daar waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten:



Pb = de batterij bevat lood

Cd = de batterij bevat cadmium

Hg = de batterij bevat kwik