



## Korte gebruiksinstructie: indicator type 2790

Toetsen	Functie en bediening	
	In- en uitschakelen van de weegschaal. Belaste weegschaal uitschakelen: toets > 5 seconden ingedrukt houden	
	Nulstellen aflezing bij onbelaste weegschaal. (beperkt bereik -1..+3% van het weegbereik)	
	Tarreren = nulstellen over het hele weegbereik Tarrering opheffen met toets:	
	Start printer afdruk, of data verzenden naar computer	
  <b>HOLD</b>	<p>Speciale functie toets, indien op BMI functie ingesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorg ervoor dat de weegschaal leeg is en op nul staat</li> <li>- bedien de  toets: de lichaamslengte is nu instelbaar</li> <li>- verhoog de lengte met toets: </li> <li>- verlaag de lengte met toets: </li> <li>- bedien de  toets: het gewicht wordt weer afleesbaar</li> <li>- ga op de weegschaal staan / zitten</li> <li>- na stilstand van de aflezing wordt het gewicht vastgezet en afwisselend het gewicht en de BMI waarde getoond</li> </ul> <p>Uitschakelen BMI functie met toets: </p> <p>De BMI functie op toets "F" wordt in de User Mode geprogrammeerd.</p>	
Display	Foutmeldingen	Oorzaak, oplossing
Err 01	Programma verstoord	herprogrammering door leverancier
Err 03	Geen BMI	weegschaal is niet leeg
Err 05	Nulstellen niet mogelijk	gewicht is buiten het nulstelbereik
Err 06	Tarreren niet mogelijk	aflezing is al op nul of negatief
Err 07	Printen geblokkeerd	weegschaal is over- of onderbelast
Err 10	Te hoog / laag weegsignaal	o.a. kabel of krachtopnemer defect